

Instruções de uso

FIXAÇÃO DA ZIRCÔNIA AO HOLDER.


APLICAÇÃO

Zirconia Dental Direkt sem anel plástico para fixação (discos de 98mm).


Devido à alta translucidez do material (o que o torna mais frágil antes da sinterização), pode ocorrer trinca nos discos durante o processo de fixação no holder.

Para evitar esse problema, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Ao apertar o disco, utilizar ferramentas manuais de acordo com o equipamento, sem dar torque ou aperto manual excessivo;
- Recomendamos utilizar uma chave manual em "L" (conforme o tipo de parafuso);
- Caso o holder possua 3 parafusos, chegar sem apertar dois deles (A), depois, chegar o terceiro (B). Feito isso, voltar ao primeiro e verificar se ficou firme, procedendo da mesma forma com o segundo e terceiro parafusos;

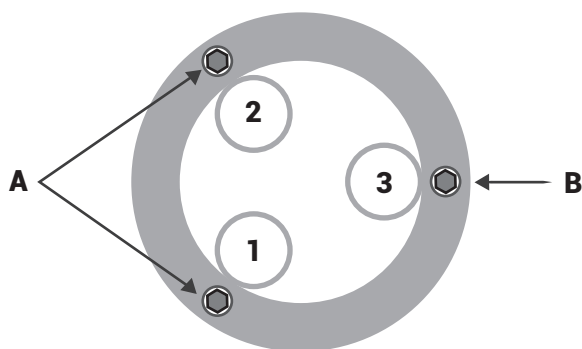

- Caso o holder possua 4 parafusos, chegar os parafusos de forma cruzada, e efetuar a verificação de aperto em todos os parafusos, começando pelo que foi fixado primeiro;

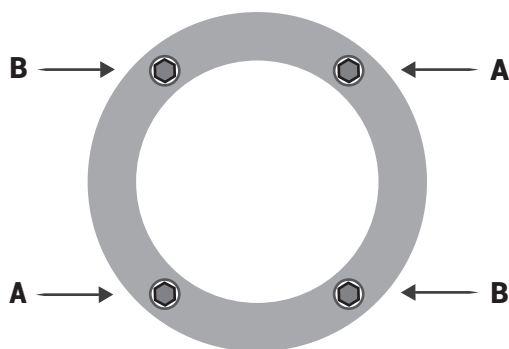

Com estes procedimentos simples, podemos evitar trinca no material. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.